

抗原定性検査キット取扱説明書

検査前に必ず
ご確認ください

検査前に必ず以下をご確認いただき、正しく検査を行ってください。

① キット内容

直射日光は避けて保存してください

テストデバイス
※アルミパウチに入っています




抽出用バッファのチューブ



ノズルキャップ




滅菌スワブ

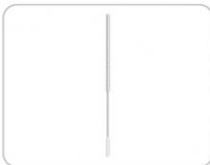


② 検査方法

鼻腔検体の採取は必ず受検者本人が行ってください

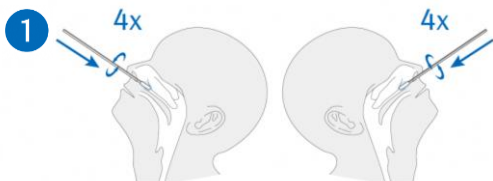


検体採取

頭部を約70°の角度になるよう後ろ側に少し傾げる。スワブを回転させながら鼻腔約2cmのところまで挿入。鼻腔壁にスワブを4回(約15秒間)回転させ、粘膜表皮を採取。滅菌スワブの先端がほかの部位に触れないように注意深く引き出します。同じスワブを使用して反対の鼻腔でも同様の操作を繰り返します。

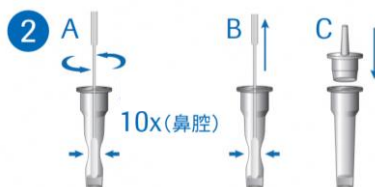

試料の調製

A. スワブを抽出用バッファのチューブに移し、
B. チューブ側面からスワブ頭部をつまみ、
試料を絞り出すようにスワブを引き抜き、
C. ノズルキャップをしっかりと閉めます。

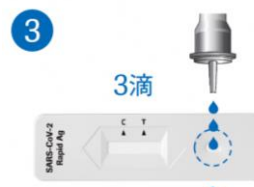

検体の滴下

テストデバイスの検体滴下孔に抽出した試料3滴を滴下します。




測定結果の判定

陰性の判定はコントロールラインが早めに出現した場合であっても、必ず15分以降に行ってください。また、30分以上経過した後の判定は正確な測定結果が得られない可能性があります。

結果読み取り15~30分の間に
検査結果を医療機関受診時に提示できるよう、
スマートフォン等で撮影し
画像として手元に保存してください。

③ テスト結果判定

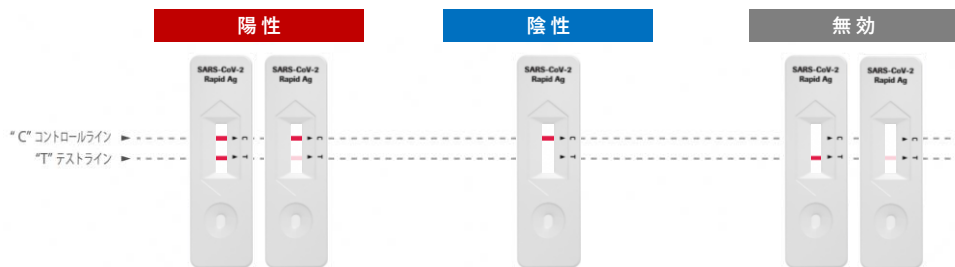

抗原定性検査キットに関するお問合せ先

福島県新型コロナ検査キット配布センター

0120-941-546

受付時間：午前9時から午後7時まで（土日祝日を含む毎日）

■ 使用済みのキットは自治体の分別区分に従って廃棄してください